

Instructiekaart zuurstofcilinder en reduceertoestel

Westfalen Medical BV
Postbus 124
7400 AC Deventer
Nederland
Tel. +31 (0) 570 – 858 450
Fax +31 (0) 570 – 858 451
www.westfalenmedical.nl
info@westfalenmedical.nl

<p>1. Lees altijd de instructies.</p> 	<p>2. Niet roken. Geen open vuur.</p> 	<p>3. Ventileer de ruimte goed.</p> 
<p>4. Zet de zuurstofcilinders altijd vast en rechtop.</p> 	<p>5. Geen olie/vetten gebruiken.</p> 	<p>6. Maximale lengte verbindingsslang.</p> 
<p>7. Wij adviseren u de neusbril 1x per week te vervangen.</p> 	<p>8. Gebruik geen elektrische apparatuur.</p> 	<p>9. Storingen en/of vragen:</p>  <p>Tel. 0570 – 858 450</p>

Plaatsen reduceertoestel

- Schroef het reduceertoestel op de cilinder (handvast)
Let hierbij op dat uw handen schoon en vetvrij zijn.
- Open de cilinder door de hoofdkraan van de cilinder open te draaien (draaiknop boven op cilinder)
- Stel de flowmeter (aantal liter per minuut) in zoals voorgeschreven door uw arts.
- Ervaart u geen flow; controleer de flow door de neusbril en/of slang op uw handpalm of in een glas water te plaatsen. Bij geen bubbels, de slang nalopen en de flowmeter controleren. Ervaart u nog steeds geen flow, neemt u dan contact op met Westfalen Medical.

Verwijderen reduceertoestel

- Sluit de cilinder door de hoofdkraan van de cilinder dicht te draaien (draaiknop boven op cilinder)
- Stel de flowmeter van het reduceertoestel in op stand 2 of diens hoogste stand.
- U hoort/laat nu de resterende zuurstof uit het reduceertoestel lopen (dit is dus niet de inhoud van de fles).
- Controleer of alle zuurstof uit het reduceertoestel is, door op de Inhoudsmeter te kijken, deze dient op "0" te staan.
- Stel de flowmeter in op stand 0.
- Schroef het reduceertoestel van de cilinder. Dit kan zonder kracht met 2 vingers gebeuren. Let op! Hierbij mag geen gebruik gemaakt worden van gereedschap.